

# EVERCLEAR GOTAS

## **INSTRUCCIONES DE USO:**

- Utilice 2-3 gotas de solución siempre que lo necesite.
- Parpadee varias veces tras la administración.
- Si las molestias en sus ojos persisten, quítese las lentes de contacto y contacte con un especialista de la visión.
- Mantenga el frasco siempre bien cerrado después de su utilización.
- Conservar ente 5° C- 30°C.
- Utilice la solución en los 30 días después de su apertura.
- No utilizar pasada la fecha de caducidad.

## **DESCRIPCION:**

- Mantiene las lentes de contacto hidratadas y calma sus ojos.
- Incrementa el confort al llevar lentes de contacto.
- Recomendado para lentes diarias, mensuales y lentes blandas.

## **RECICLADO:**

- Tire la solución sobrante por el desagüe.
- Tire el frasco vacío al contenedor de reciclaje adecuado.

NO UTILICE EVERCLEAR SI TIENE ALERGIA A ALGUNO DE LOS INGREDIENTES DE SU COMPOSICIÓN.

## **COMPOSICIÓN:**

Solución isotónica diluida estéril con HPNC 0.3% W/V y PHNB 0.0001% W/V.