

ES

Total
Care

TotalCare es un sistema sencillo y cómodo para el cuidado de lentes de contacto rígidas y permeables al gas.

TotalCare también aumenta la comodidad y el tiempo de uso de las lentes de contacto.

El sistema TotalCare está formado por los siguientes componentes:

Limpiador diario TotalCare • Solución desinfectante/conservante/humectante TotalCare

Estuche para lentes TotalCare • Tabletas para la eliminación de proteínas TotalCare

Cuidado diario: Lávese y séquese bien las manos siempre antes de manipular las lentes de contacto.

Limpieza

- Retire la lente del ojo izquierdo y colóquela en la palma de la mano. Deposite 2-3 gotas de limpiador diario TotalCare en cada superficie de la lente y frote 15-20 segundos con el dedo.
- Enjuague bien la lente con solución TotalCare o con solución salina estéril para eliminar todos los restos del limpiador.
- Coloque la lente en el compartimento correspondiente (L) del estuche de las lentes y cierre la tapa.
- Llene completamente el estuche de las lentes con solución TotalCare.
- Repita este procedimiento con la lente de contacto derecha.

Desinfección

Deje las lentes de contacto sumergidas en solución TotalCare durante un mínimo de 6 horas (toda la noche) para garantizar una desinfección completa. Guarde las lentes en el estuche cerrado hasta que esté preparado para ponérselas.

Nota: Las lentes podrán conservarse en el estuche cerrado durante un máximo de 30 días. En caso de almacenarlas durante un periodo más prolongado, vuelva a desinfectarlas antes de ponérselas. Enjuague las lentes con solución TotalCare y póngaselas. Deseche la solución usada, enjuague el estuche de las lentes con solución TotalCare y déjelo secar al aire.

Humectación

Para humectar las lentes de contacto antes de ponérselas, deposite una o dos gotas de solución TotalCare en la superficie interior de cada lente.

Eliminación de proteínas

Las proteínas de la lágrima pueden acumularse en las lentes de contacto durante el uso normal. Esta acumulación de proteínas puede causar molestias durante el uso de las lentes y reducir la visión.

Las tabletas para la eliminación de proteínas TotalCare mantienen las lentes en perfecto estado y permiten realizar la desinfección diaria y la limpieza de proteínas en un sencillo paso. Su especialista le asesorará sobre si es necesaria una eliminación de proteínas.

Después de limpiar las lentes tal y como se describe en la rutina diaria, añada una tableta para la eliminación de proteínas TotalCare en el estuche de las lentes lleno de solución TotalCare y ciérrelo. Deje sumergidas las lentes durante un periodo de 6 a 12 horas en la solución con la tableta para la eliminación de proteínas TotalCare.

Siempre que haya usado la tableta para la eliminación de proteínas, frote y enjuague bien las lentes con solución TotalCare antes de ponérselas. Enjuague el estuche de las lentes con solución TotalCare y déjelo secar al aire.

Precauciones: Deben seguirse todas las instrucciones. Si no lo hace, pueden producirse lesiones o infecciones oculares graves.

Información general

No use ninguno de estos productos si es alérgico a cualquiera de sus componentes.

No utilice comprimidos que tengan un aspecto blanco, pegajoso o irregular.

En caso de irritación ocular, interrumpa el uso de las lentes y póngase en contacto con el especialista.

No use el producto si falta el capuchón de seguridad o está roto.

Uso

El sistema TotalCare no está diseñado para ser usado con lentes de contacto blandas.

Use siempre una solución nueva.

No use el producto después de la fecha de caducidad.

No se ponga directamente las lentes en los ojos después de usar el limpiador diario TotalCare ni después de haber sumergido las lentes en una solución con un comprimido eliminador de proteínas TotalCare. No se aplique ninguna de estas soluciones directamente en el ojo. Si sucede esto, quítese las lentes inmediatamente y enjuague el ojo con agua.

Para evitar la contaminación, no toque ninguna superficie con la punta del envase y evite el contacto con los ojos.

No enjuague las lentes de contacto o el estuche de las lentes con agua corriente.

Se recomienda usar la solución TotalCare con el estuche para lentes TotalCare de AMO.

Almacenamiento

Guarde todos los componentes del sistema TotalCare en un lugar seco.

Conservar a 5-25 °C.

Cierre bien los envases inmediatamente después del uso.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Eliminación

Deseche toda la solución restante 60 días después de haber abierto el envase por primera vez.

Producto:

Solución TotalCare:

Contenido:

Biguanida de polihexametileno (PHMB): 0,0005 %

Edetato disódico: 0,010 %

Hidroxietyl celulosa

Tampón fosfato

Agua purificada

Limpiador diario TotalCare:

Derivado de imidazolina anfotérica: 5,1 %

Alquil éter sulfato aniónico: 0,48 %

Amida de ácido graso no iónica: 2,2 %

Tabletas para la eliminación

Subtilisina A (0,4 mg/comprimido)

de proteínas TotalCare:

Nota: Es posible que no todos los productos anteriormente enumerados estén incluidos en el paquete sino que se vendan por separado si se requieren.

Símbolos



Consulte las instrucciones de uso




No aplicar directamente en el ojo




Fabricante



Fecha de caducidad

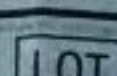

Código del lote

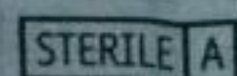


Estéril. Técnica aséptica



No usar si el paquete está dañado



Deseche toda la solución restante 60 días después de haber abierto el envase por primera vez

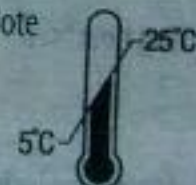

Limitación de temperatura